



Sentido de
la grabación

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN:

- El preservativo debe colocarse sobre el pene erecto antes de que se produzca el contacto con el cuerpo de la pareja.
- Evitar tocar el preservativo con uñas, afilados, anillos, etc. Tratado con suavidad al extraerlo del envase.
- Desentallar el preservativo por la parte enrollada hacia afuera para extenderlo de forma adecuada.
- Tras la eyaculación el pene debe retirarse lentamente antes de que haya desaparecido totalmente la ercción manteniendo puesto el preservativo y sujetándolo por su base para asegurar que no haya salido de semen durante la retirada.
- El preservativo solo puede utilizarse una vez. No lavarlo jamás.
- Si se desea una lubricación adicional, **útilice solo lubricantes en vehículo acuoso (ej. glicerina)**. Los lubricantes oleosos como vaselina, parafina, aceite infantil, **lecciones corporales**, aceites para masajes, mantequilla, margarina u otros aceites pueden dañar el preservativo.
- En el supuesto que se esté administrando medicamentos de uso tópico que se apliquen al pene o a la vagina, consultar a un médico o farmacéutico sobre su compatibilidad con los preservativos de latex.
- Observar la fecha de caducidad impresa en el estuche y en el envase individual.

INSTRUCCIONES DE CONSERVACION

Guardar los preservativos en un lugar fresco y seco, apartados de la luz, calor y del calor.
No sacarlos de su envase de papel-adminimo hasta el momento de su utilización.

INDICACIONES SOBRE PROTECCION FRENTE A ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL

Los preservativos de latex usados adecuadamente pueden prevenir la transmisión de enfermedades ocasionadas por relación sexual: sífilis, gonorrea, infecciones por clamidia, herpes genital, hepatitis B o SIDA.

La utilización de preservativos no elimina este riesgo en su totalidad.

Para conseguir la máxima protección es importante seguir las instrucciones de uso.

Los ETS se pueden transmitir en los contactos íntimos a través de los fluidos corporales o por lesiones, por lo tanto el preservativo debe ser colocado antes de cualquier contacto.

INSTRUCCIONES DE DISEÑO

Después de utilizar el preservativo

NO debe tirarse en el WC.

CE

0318
EN 600: 1996

Sentido de
la grabación